

Очистка оптических частей Вашего инструмента HEINE

Загрязнение внешних оптических поверхностей, например, пыль или отпечатки пальцев, может привести к необходимости очистки. Примечание: чистящие средства, содержащие растворители, могут повредить пластиковые линзы или их покрытие.

Порядок действий:

- Сначала осторожно удалите загрязнения с помощью струи воздуха или специальных щёточек.
- Смочите чистый ватный тампон (вату) или специальную салфетку для очистки оптики (например, WHATMAN Lens Cleaning Tissue 105 или Tiffen Lens Cleaning Paper) и удалите излишки влаги с помощью чистого абсорбирующего материала:
 - Для первого этапа очистки: используйте воду.
 - Для масляных и жирных загрязнений: используйте слабый раствор моющего средства и дистиллированной воды (например, 5 капель в 10 мл).
- Протирайте всегда с легким нажимом и „по спирали“ от центра к краю.
- Повторяйте протирание „по спирали“ свежесмоченными ватными палочками или специальными салфетками до тех пор, пока очистка не будет успешной.
- Удалите остатки чистящих жидкостей сухой ватной палочкой или специальной тканью.



TTT HealthCare

Генеральный партнёр HEINE в России и СНГ

Heimat 89 • 14165 Berlin • Germany

E-Mail: info@ttt-gmbh.com • www.ttt-gmbh.com

Tel: +49 151 15353792



HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG • Dornierstr. 6 • 82205 Gilching • Germany

E-Mail: info@heine.com • www.heine.com

