

HEINE Универсальный адаптер для смартфона MAG для DELTA 30 PRO, DELTA 30 и DELTAone

Цифровая дерматоскопическая документация с помощью камеры смартфона.


ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО!



С универсальным адаптером HEINE MAG для смартфонов Вы можете использовать практически любой смартфон, независимо от операционной системы (Android, Windows, ...)*.



Затем прикрепите адаптер к крепёжной шайбе.

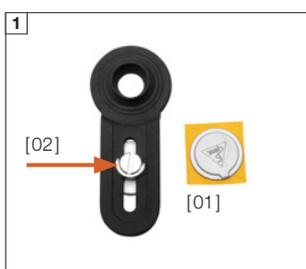

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ

Держите крепёжную шайбу [01] отдельно от магнита кронштейна адаптера, прежде чем прикрепить её к корпусу телефона!

Если они все же соединились, вывинтите винт [02] из адаптера, снова разверните его вовнутрь и таким образом разъедините обе пластины.



Слегка ослабьте винт.

Если у Вашего смартфона есть только одна камера, установите адаптер по центру перед этой камерой.

Если Ваш смартфон оснащён несколькими камерами, сначала проверьте, какая из них является основной: поместите кронштейн адаптера на заднюю панель смартфона так, чтобы один из объективов камеры находился в центре. Чётко ли виден объект в поле зрения камеры? Если Вас всё устраивает, затяните винт на кронштейне адаптера перед этой камерой.



Вам понадобится DELTA 30 PRO, DELTA 30 или DELTAone и универсальный адаптер для смартфона MAG, состоящий из крепёжной шайбы и адаптера, а также Ваш смартфон и подходящий для него чехол**.

Чехол для мобильного телефона должен иметь твёрдую заднюю часть из поликарбоната или акрилового стекла.



Снимите защитную плёнку с крепёжной шайбы и плотно по центру придавите её к чехлу камеры справа ниже выбранной камеры.



Магнитный адаптер фиксирует смартфон вместе с чехлом на фокусирующем кольце дерматоскопа.

Теперь Вы можете использовать функцию камеры на своем смартфоне, как обычно.



*Все торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.
**Смартфон и чехол для мобильного телефона не входят в комплект поставки.