

HEINE iC1 Краткое руководство пользователя



Загрузите приложение HEINE DERM в AppStore.



Вставьте iPhone в подходящий чехол-адаптер до щелчка. Убедитесь, что камера находится в правильном положении.



Вставьте дерматоскоп HEINE iC1 в чехол-адаптер до щелчка.



Включите.



Устройство запускается в режиме поляризации. Функция переключения может использоваться для переключения между поляризационным и иммерсионным режимом.



Извлеките дерматоскоп HEINE iC1 из чехла-адаптера.



Выдавите iPhone из чехла-адаптера большим пальцем через углубление.



Зарядите HEINE iC1 с помощью прилагаемого USB-кабеля и сетевого адаптера.

Очистка и дезинфекция



Обратите внимание, что дезинфицирующие и чистящие средства нельзя распылять непосредственно на контактную плату во избежание повреждения устройства.

Рекомендуемые чистящие средства для дерматоскопа: Neodisher® MediClean
Рекомендуемые дезинфицирующие средства для дерматоскопа: четвертичные аммониевые соединения (например, салфетки Cleanisept® или салфетки Microbac®)

Рекомендуемые чистящие средства для контактной платы: Neodisher® MediClean
Рекомендуемые дезинфицирующие средства для контактной платы:
Четвертичные аммониевые соединения (например, Microbac® Tissues).

TTT HealthCare

Генеральный партнёр HEINE в России и СНГ

Heimat 89 • 14165 Berlin • Germany
E-Mail: info@ttt-gmbh.com • www.ttt-gmbh.com
Tel: +49 151 15353792

